

Thommen Medical Library Installation Exocad DentalDB

Version des Dokument 2026/08

Hinweise zur Anwendung

Elektronischen Gebrauchsanweisungen zur Anwendung unserer CAD/CAM Produkte finden Sie hier:

Titanbasis für CAD/CAM:	https://www.ifu-tm.com/THM61123
VARIOtemp und VARIOflex Abutment:	https://www.ifu-tm.com/THM61119
VARIOmulti Titanbasis:	https://www.ifu-tm.com/THM61118
Medical 3.0 Implantatsystem:	https://www.ifu-tm.com/THM61146
Fräsabutment für CAD/CAM Typ II:	https://www.ifu-tm.com/THM61137
Digitale Abformung (Scanabutment und Analog):	https://www.ifu-tm.com/THM61143
Dynamic Tibase®	https://www.das-eifu.com

Damit die Analogbibliothek mit den Implantatbibliotheken funktioniert, müssen alle Bibliotheken auf den neusten Stand gebracht werden.

Import der Implantat Bibliothek

Die Bibliothek befindet sich in der zip-Datei. Es ist der Ordner mit mehreren SDFA-Dateien und einer confix.xml-Datei.

Bei einer Abutmentbibliothek:

- Entfernen sie ggf. die alte Bibliothek
- Kopieren Sie den entsprechenden Ordner in das Exocad Bibliotheken Verzeichnis
z.B.: «C:\exocad-DentalCAD3.3\DentalCADApp\library\implant»
- Starten sie exocad neu

Bei der Implantat-Analog-Bibliothek:

- Entfernen sie ggf. die alte Bibliothek
- Kopieren Sie den entsprechenden Ordner in das Exocad Model Creator Bibliotheken Verzeichnis
z.B.: «C:\exocad-DentalCAD3.3\DentalCADApp\library\modelcreator\implants»
- Starten sie exocad neu